

ART01 Griffsystem

Hilfsmittel zur selbständigen WC-Nutzung

Beachten Sie Folgendes vor dem Einbau

- Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, um unsere Toilettengriffe zu verstehen und bereiten Sie im Voraus die notwendigen Werkzeuge für die Installation vor. Installieren Sie die Toilettengriffe ordnungsgemäß den Anweisungen nach. Dies wird dazu beitragen, Schäden für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum zu vermeiden.
- Bitte halten Sie die Anleitung bereit, nachdem Sie sie sorgfältig gelesen haben und bewahren Sie diese nach dem Einbau auf.
- Bitte beziehen Sie sich auf die aktuellen Produkte, sollten die Anweisungen von diesen abweichen. Sie erhalten keine weitere Benachrichtigung für neue Updates für Produkte und Zubehör.




Toilettengriffe und Zubehör



Bitte halten Sie nebenstehende Bestandteile und das Installationswerkzeug für den Aufbau Ihres ART01 Griffsystems bereit.

So garantieren Sie einen reibungslosen Ablauf ohne unnötige Unterbrechungen.

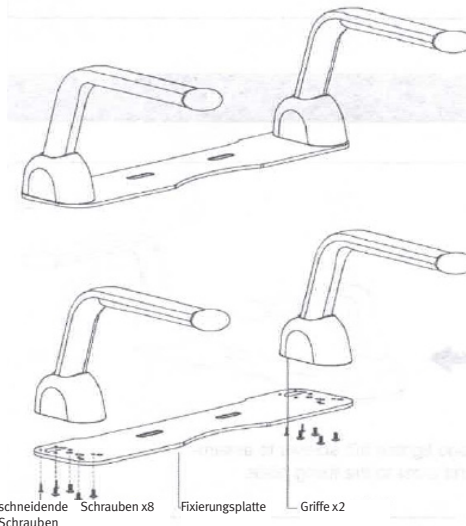

Bestandteile	
	Schneidende Schrauben x4
	Schrauben x8
	Anleitung x1
	Integrierter Schraubensatz x2

Installationswerkzeug	
	Schraubenzieher
	feuchtes Tuch

Vorsichtsmaßnahmen

Wie in **Abbildung 1** dargestellt, müssen Keramik und Fixierungsplatte die folgenden Anforderungen erfüllen:

1. Um eine Beeinträchtigung zwischen dem Ende der Armlehne und der Toilettenkeramik zu vermeiden, muss der Bereich von $A \geq 60 \text{ mm}$ flach sein.
2. Abstand der Montagelöcher im Toilettensitz:
 $130 \text{ mm} \leq B \leq 200 \text{ mm}$

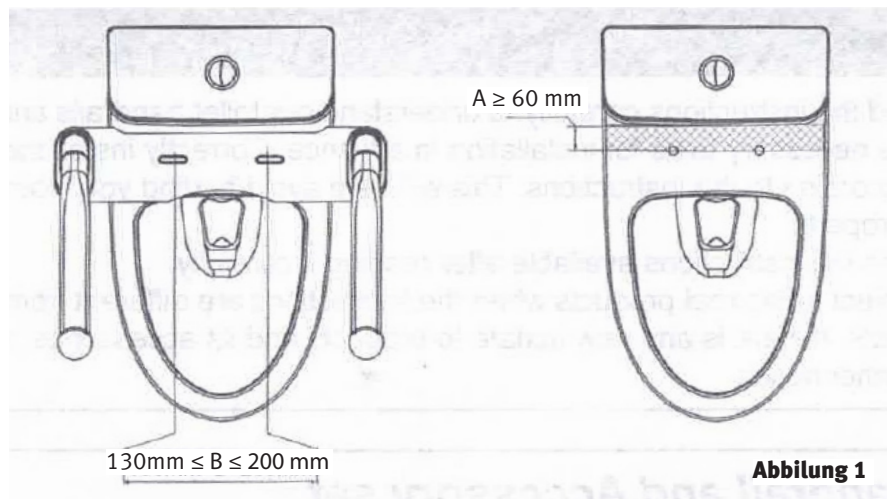


Abbildung 1

Installation

1



Montieren Sie die Griffe. Befestigen und ziehen Sie die Schrauben fest, um den linken und rechten Arm an der Fixierungsplatte zu montieren.

2



Entfernen Sie die Toilettenbrille und deren Befestigung ordnungsgemäß von der Toilette.

Die abgebildete Toilette dient nur als Referenz. Ihre Toilette kann abweichen.

3



Bringen Sie die Griffschrauben in den Befestigungslöchern der Toilette an.

Entfernen Sie keine anderen Teile des integrierten Schraubensatzes.

4



Platzieren Sie die Fixierungsplatte auf der Toilette und befestigen Sie die Löcher an den Befestigungslöchern der Toilette.

5



Fixierungsplatte installieren: Verschrauben Sie die Scharniere, ziehen Sie sie halb fest, wie in der Abbildung oben gezeigt. (Schrauben nicht vollständig festziehen.)

6



Installieren Sie die Toilettensitzlehne.

7



Richten Sie den Toilettensitz auf der Toilette aus und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest an.

(Manchmal muss der Toilettensitz abgenommen werden, um die Schrauben vollständig festzuziehen.)

8



Toilettensitz abnehmen, um die Befestigungsschrauben an den Ausrichtungspositionen vollständig festzuziehen. Bringen Sie die Scharnierabdeckungen an.

9



Klicken Sie den Toilettensitz wieder ein. Fertig.

Anmerkungen

- Um zu verhindern, dass die Sicherungsmutter während der Verwendung der Armlehne herausgezogen oder gelockert wird, versuchen Sie, das Scharnierbasis-Befestigungsset so fest wie möglich zu befestigen, ohne dass sich die Mutter löst.
- Um zu verhindern, dass der Toilettensitz zur Seite fällt oder erheblich nach oben gekippt wird, schütteln Sie die Armlehne nicht kräftig und üben Sie keinen übermäßigen Druck ($C \leq 80 \text{ kg}$) auf eine Seite aus, nachdem die Armlehne ordnungsgemäß, gemäß dieser Anleitung, installiert wurde.
- Um Schäden an den Hebehandläufen zu vermeiden, tragen die Doppelhandläufe gleichzeitig $D \leq 120 \text{ kg}$.
- Die oben genannten Zahlen dienen nur als Referenz.



Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie zum Reinigen ein mildes Reinigungsmittel wie flüssiges Spülmittel und warmes Wasser. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel mit hoher Dichte, die die Oberfläche zerkratzen oder stumpf machen könnten.
- Lesen Sie das Etikett des Reinigerprodukts sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass der Reiniger für die Verwendung auf dem Material geeignet ist.
- Testen Sie Ihre Reinigungslösung immer an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie sie auf die gesamte Oberfläche auftragen.
- Wischen Sie die Oberflächen sauber und spülen Sie sie sofort nach dem Auftragen des Reinigers vollständig mit Wasser ab. Spülen und trocknen Sie jeglichen Overspray, der auf umliegenden Oberflächen landet.
- Verwenden Sie einen weichen, angefeuchteten Schwamm oder ein Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen von Oberflächen niemals scheuernde Materialien wie eine Bürste oder einen Scheuerschwamm.

