

Aufstehhilfe Typ: R2Dfx

Hilfsmittel zur selbständigen WC-Nutzung

Informationen

Die R2Dfx Aufstehhilfe hilft älteren oder beeinträchtigten Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich auf die Toilette zu setzen und aufzustehen, diesen Vorgang selbständig zu bewältigen. Der Bewegungsablauf der Aufstehhilfe ist so konzipiert, dass er der tatsächlichen Bewegungslinie zwischen Sitzen und Aufstehen optimal folgt. So kann der Benutzer den bisher sehr mühsamen und kräftezehrenden Vorgang mit wenig Aufwand und einfach per Knopfdruck durchführen.

Das Gerät ist einfach aufgebaut und bietet vielfältige Einstellmöglichkeiten für die

A) Anpassung an die verschiedenen Arten von Toilettenschüsseln


B) Anpassung an den Benutzertyp.

Zu diesem Zweck verfügt das Gerät über 3 Betriebsarten, die mit der einfachen mechanischen Veränderung eines Hebels an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden können. Die Aufstehhilfe R2Dfx kann an die individuelle Größe von Personen angepasst werden. Ebenso ist eine reine Höhenverstellung möglich. Dank der vielfältigen Einstellmöglichkeiten kann die R2Dfx bei nahezu allen Gegebenheiten eingesetzt werden.




Technische Daten


- ✓ Maße: 615 x 580 x 620
- ✓ Maximale Tragfähigkeit:
 - 1 Motor: 100 kg
 - 2 Motoren: 150 kg
- ✓ Gewicht: 25 kg
- ✓ Hebebereich: 425 - 760 mm
- ✓ Max. Neigung: 40°
- ✓ Schutzart: IP44
- ✓ Stromanschluss: 220 - 230V/50Hz, 16 A
- ✓ Hebemotor: 24 VDC
- ✓ Material: pulverbeschichteter Stahl
- ✓ Farbe: weiß
- ✓ Umweltdaten: Temperatur +5°C bis +40 °C

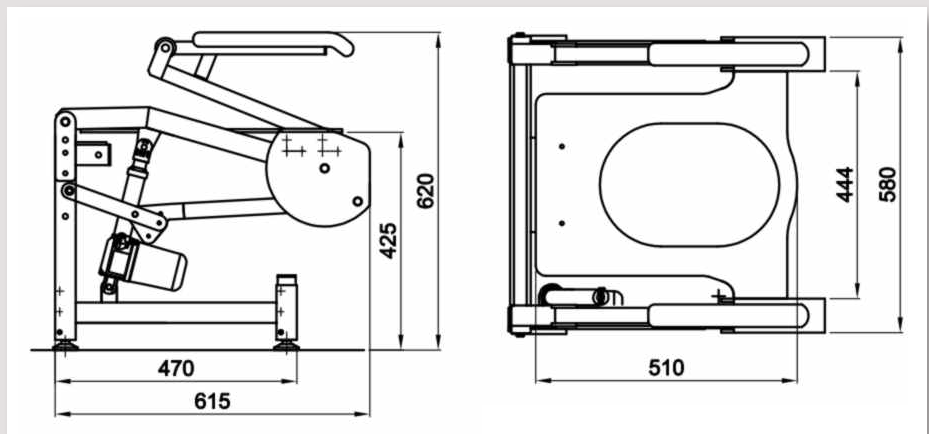

A) Anpassung an die Toilettenschüssel

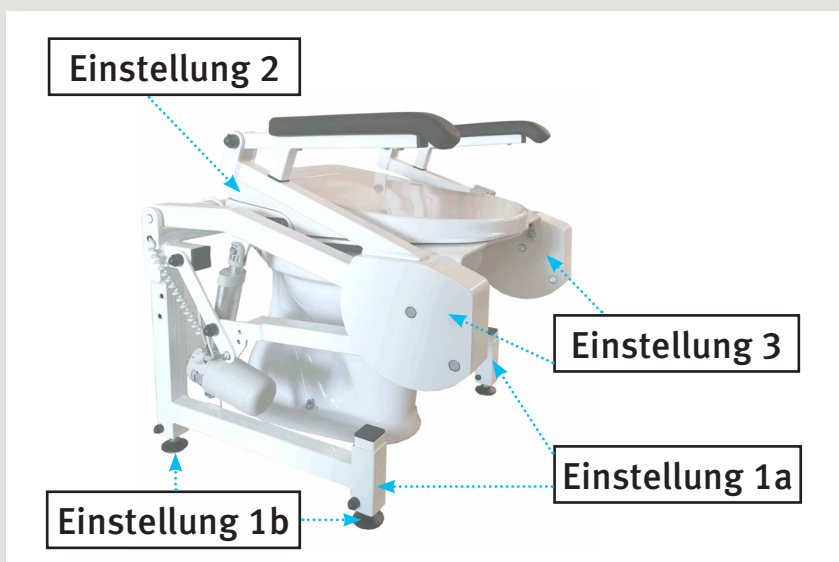

B) Anpassung an die Nutzer

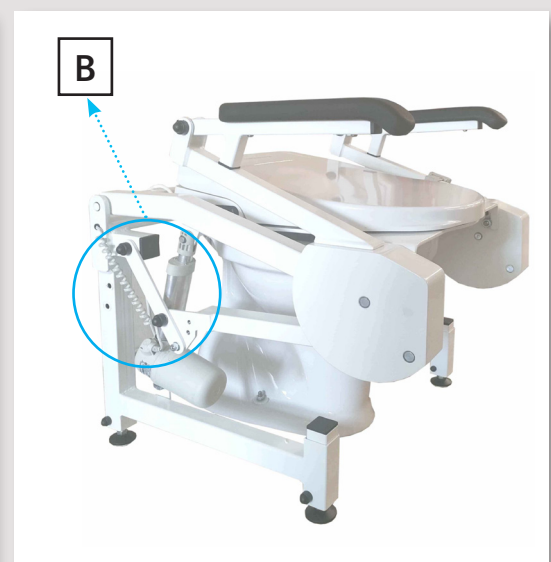

A) Anpassung an die Toilettenschüssel

Einstellung 1a | Höhe: Grobeinstellung



Höheneinstellung
80 mm in 2 Schritten

Einstellung 1b | Höhe: Feineinstellung



Höheneinstellung
30 mm stufenlos


Einstellung 2 | Befestigung an der Keramik



Horizontal 30 mm
(hier: Aufsicht)

Einstellung 3 | Einstellung der Sitzplatte


Horizontal 30 mm

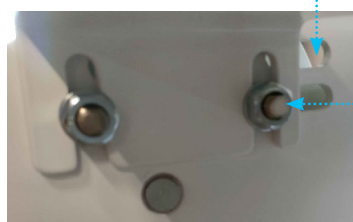


Vertikal 30 mm

B) Anpassung an die Nutzer


Position 1 und 2 Hohe Körpergröße

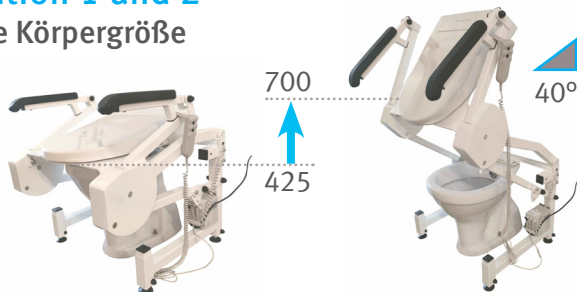


Position 3 und 4 Mittlere Körpergröße

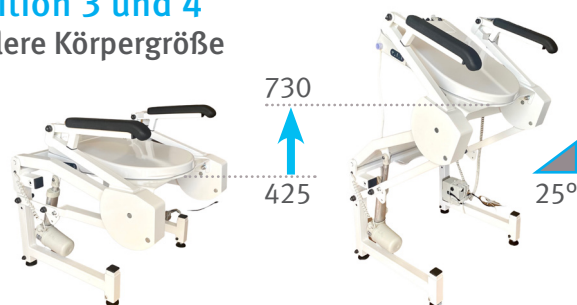

Position 5 und 6 Vertikale Beförderung

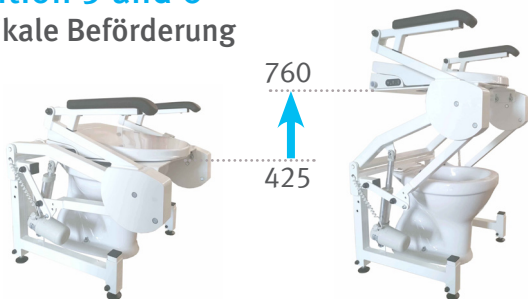

WICHTIG: Bevor Sie irgendeine Einstellung vornehmen, bitte beide Seiten der Hebel lösen – das heißt (je nach angegebener Position) die Schrauben (hier 6 und 5) ganz herausdrehen, Schrauben und Mutter entfernen. Die neue Position kann dann auf beiden Seiten gleichzeitig eingestellt werden.

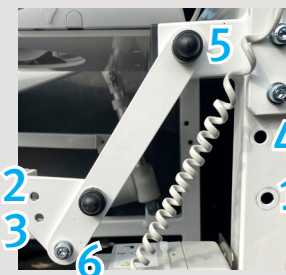

Inbetriebnahme

Folgende Schritte sind zu beachten:

1. ANPASSUNG AN DIE NUTZER
Gemäß **Punkt B** den passenden Betriebsmodus auswählen. Nach Auswahl und Einstellung des Betriebsmodus Anlage an den Toilettensitz anpassen.
2. ANPASSUNG AN DIE TOILETTENSCHÜSSEL
Gehen Sie wie folgt vor:
 1. Toilettenhöhe messen.
 2. Grobeinstellung der Anlage gemäß **Einstellung 1a** wählen.
 3. Aufstehhilfe über die Toilette setzen.
 4. Feineinstellung gemäß **Einstellung 1b** vornehmen.
 5. Anlage an der Toilettenschüssel einstellen und befestigen gemäß **Einstellung 2**.
 6. Nach Befestigung der Anlage an der Toilettenschüssel, die Füße (Einstellung 1b) noch einmal nachziehen, so dass die Anlage ganz fest an der Schüssel anliegt. Dann mit der Kontermutter der Einstellung 1b die Position befestigen.
 7. Sitzplatte gemäß **Einstellung 3** an das Loch der Toilettenschüssel einstellen. Bei einer optimalen Einstellung deckt die Sitzplatte das Loch so ab, dass unter der Sitzplatte der Rand der Toilettenschüssel nicht zu sehen ist.
 8. Stromanschluss und Test der Anlage.
 9. Toiletten Brille oder Dusch-Bidet an die Sitzplatte der Aufstehhilfe befestigen.