


Aufstehhilfe R2D2 - Montageanleitung

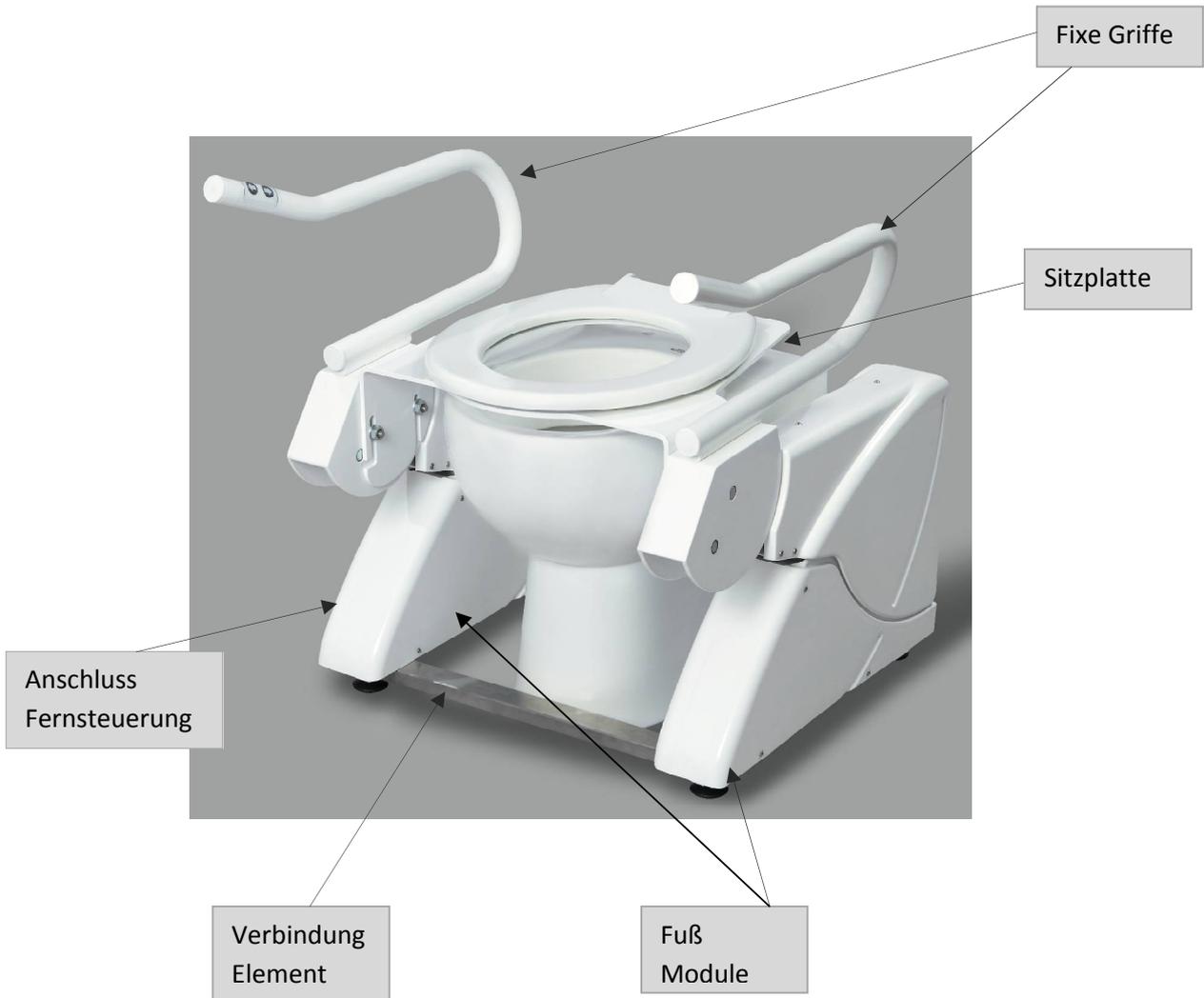

LIEFERLISTE - *Aufstehhilfe R2D2*



Verpackungsdaten:

Verpackung in Spezial hergestellten Karton

Masse: 800 x 700 x 350 mm

Gesamtgewicht : ca. 41 kg

Verpackungsinhalt :

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>
1.	R2D2- Füße (Seitenelement)	2
2.	Verbindungselement	1
3.	Befestigungssatz für Verbindungselement	1
4.	Sitzplatte	1
5.	Befestigungssatz Sitzplatte Füße	1
6.	Sicherungssatz	1
7.	Montage Anleitung	1
8.	Betriebsanleitung	1

MONTAGEANLEITUNG

1

Montage des Verbindung Elements

Verbindungselement



Anschlussalternativen



Anschluss Hinten




Anschluss Vorne



1. Linken und rechten Fuß aus der Verpackung nehmen



2. Verbindungselement an das Gerät positionieren, wunschgemäß eine der alternativen auswählen – dann Verbindungskabel an der linken und rechten Fuß anschließen

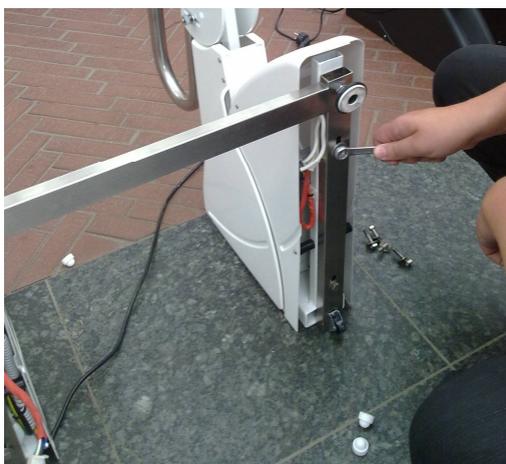

3. Nach Anschluss der Verbindungskabel mittels mitgelieferten Schrauben das Verbindungselement an die Füße festschrauben.
Achtung: Das Verbindungselement kann nach Hinten oder nach Vorne ca. 2 cm Positioniert werden.

2

Montage der Sitzplatte



1. Schrauben und Mutter lockern



2 Sitzplatte an der linken und rechten Fuß einsetzen und mit der Mutter **leicht** festziehen.



3

Endeinstellungen

1. Gerät auf die Toilettenschüssel setzen
2. Gerät in die **unterste Position Fahren !**
3. Die Sitzplatte parallel auf ca. 3-5 cm zu der Oberkante der Toilettenschüssel einstellen.
4. Die 4 Fixierungsschrauben zwischen Fußsäulen und Sitzplatte festziehen.