


# Aufstehhilfe R2D2 - Montageanleitung

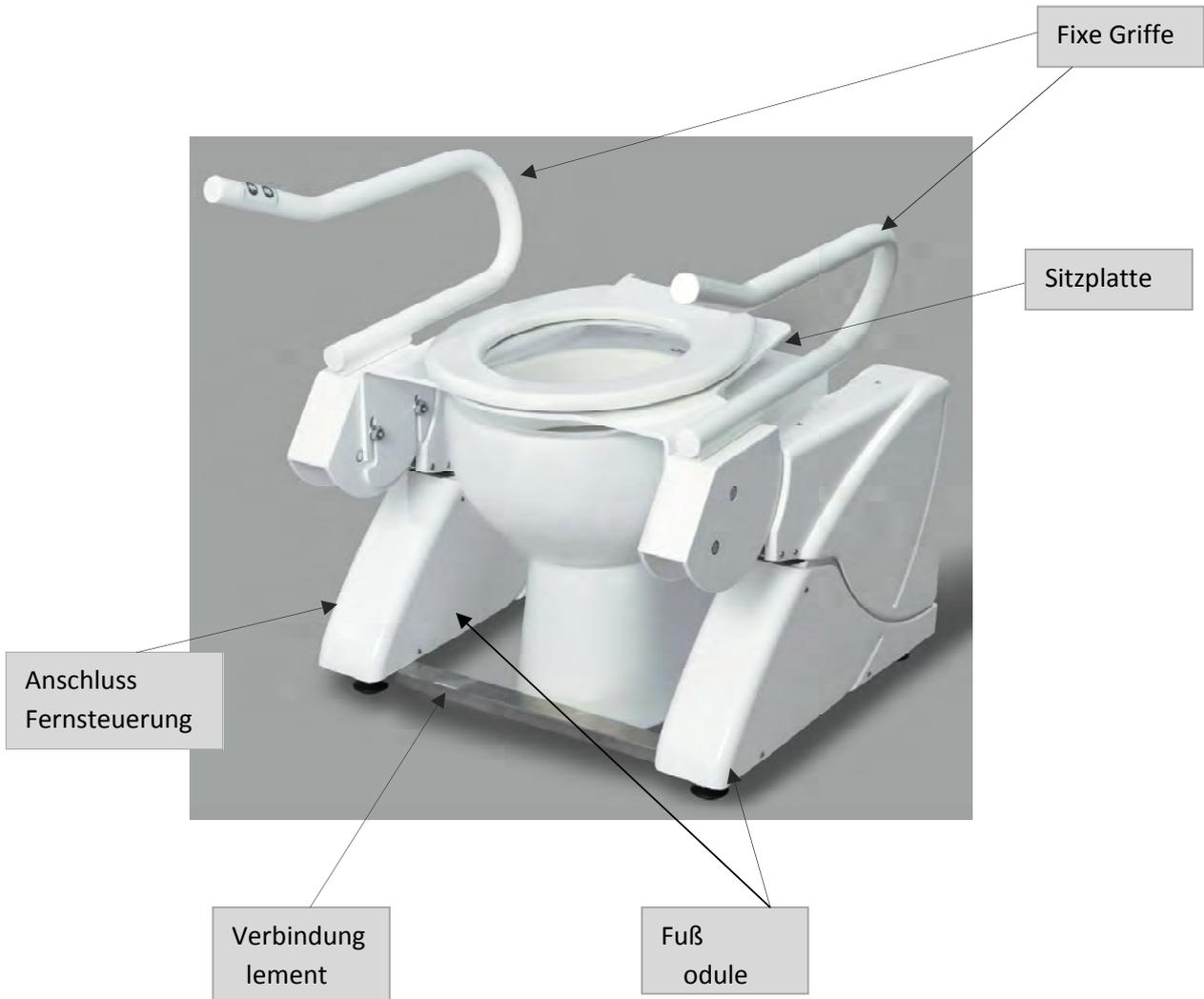

## LIEFERLISTE - *Aufstehhilfe R2D2*



### Verpackungsdaten:

Speziell hergestellte Umverpackung

Maße: 800 x 700 x 350 mm

Gesamtgewicht: ca. 41 kg

---

### Verpackungsinhalt :

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Menge</u>
1.	R2D2 Füße (Seitenelement)	2
2.	Verbindungselement	1
3.	Befestigungssatz für Verbindungselement	1
4.	Sitzplatte	1
5.	Befestigungssatz Sitzplatte Füße	1
6.	Sicherungssatz	1
7.	Montage Anleitung	1
8.	Betriebsanleitung	1

# MONTAGEANLEITUNG

# 1

## Montage des Verbindungs-Elements

### Verbindungselement



### Anschlussalternativen



Anschluss j unten




Anschluss xorne



1. Linken und rechten Fuß aus der Verpackung nehmen



2. Verbindungselement am Gerät positionieren, wunschgemäß eine Alternative auswählen. Dann das Verbindungskabel am linken und rechten Fuß anschließen

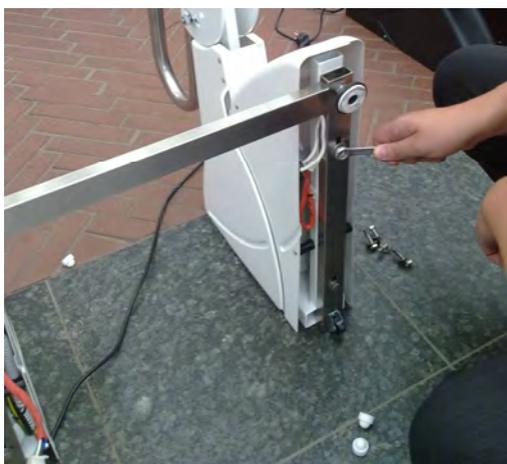

3. Nach Anschluss der Verbindungskabel das Verbindungselement mittels der mitgelieferten Schrauben an den Füßen festschrauben.

**Achtung:** Das Verbindungselement kann nach hinten oder nach vorne ca. 2 cm variiert werden.

# 2

## Montage der Sitzplatte



1. Schrauben und Mutter lockern



2 Sitzplatte am linken und rechten Fuß einsetzen und mit der Mutter **leicht** festziehen.



# 3

## Endeinstellungen

1. Gerät über die Toilettenschüssel setzen
2. Gerät in die **unterste Position fahren!**
3. Die Sitzplatte parallel auf ca. 3-5 cm zur Oberkante der Toilettenschüssel einstellen.
4. Die vier Fixierungsschrauben zwischen den Fußsäulen und der Sitzplatte festziehen.